


2008年4月より
新発売

サリキッズ®

~Salikids~

サリソフト®


~Salisoft~

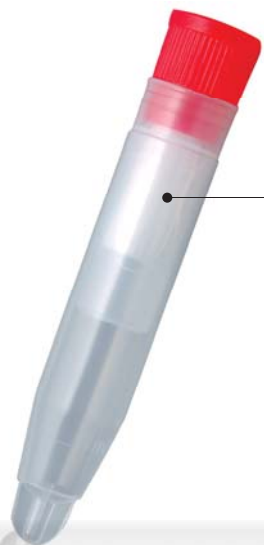

小児(6歳以上)を対象とした
安全性を最優先した誤飲防止の
為の保持紐付きスポンジ採用

No.51.1534.900
200本(50本×4袋)
定価 **34,000円** (@170)

No.51.1534.900S
[EOG滅菌済み]
200本(5本×40袋)
定価 **44,000円** (@220)

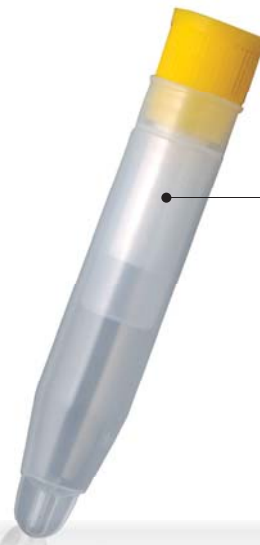

口腔内容積が小さな方を
対象とした異物感を
軽減したスポンジ採用

No.51.1534.901
200本(50本×4袋)
定価 **28,000円** (@140)

No.51.1534.901S
[EOG滅菌済み]
200本(5本×40袋)
定価 **38,000円** (@190)

特 長

- 1.唾液吸収体のスポンジを小さくしましたが、唾液量は約1ml採取できます(個人差はあります)。
(スポンジ長さ:25mm、10φmm 従来販売品[サリベット]約34%減)
- 2.素材が柔らかで、口に含んだ時の異物感が殆どありません。
- 3.安全性を考慮し、サリキッズには保持用の紐(絹糸)を取り付けています。
- 4.唾液採取～遠心～検体回収まで一連の流れによりクリーンで衛生的な清澄唾液が得られます。

商願2007-113855、実願2007-008663、
意願2007-030922、2007-030924

サリキッズ・サリソフトを用いた使用例

- コルチゾル(ストレスホルモン)の測定
- メラトニン(睡眠促進ホルモン)の測定
- ニコチン、コチニン(喫煙関連物質)の測定
- slgA(ストレスマーカー)の測定

など

商品構成



開発コンセプト


唾液を用いての研究・検査は、被験者のストレスを軽減出来る上で有意義です。従来の唾液採取用チューブのコットン唾液吸収体は、綿を円筒形に形成する際に接着剤が使われていますが、今回採用したスポンジ(ポリプロピレン・ポリエチレン重合体)唾液吸収体は、接着剤を使用しておらず、分析、測定の際に夾雑物の影響が殆どありません。また、従来のコットン唾液吸収体は、長さが38mmあり、小児或いは口腔内容積が小さな方には大きすぎて、口に含んだ時に異物感がありました。この問題を解決する為に、長さを25mmと従来品より約34%減じました。唾液採取量は個人差がありますが約1ml採取でき、一回の採取で繰り返しの測定や数種類の物質の測定ができる唾液量が得られます。更に、小児の唾液採取には保持紐を取り付けて安全性を重視し、異物感の少ない素材で小さくても十分な唾液量が採取できる吸収体を用いた製品を開発し商品化致しました。

スポンジ素材の安全性について

- スポンジ素材の安全性は、FDA21 CFR177.1520やMEM Elution cytotoxicity test (ISO Method) で確認済みです。

取扱いの留意点、使用方法について


- スポンジを飲み込まないように充分注意してください。小児の使用には、保護者等の成人のサポートの下に使用する事をお勧めします。
- 移送時の液漏れを防ぐ為に、サンプリング後はキャップをしっかり押し締めてください。
- 汚染を防ぐ為に使用前には手を良く洗い、唾液採取は食後または薬の経口服用後30分以内には行わないでください。

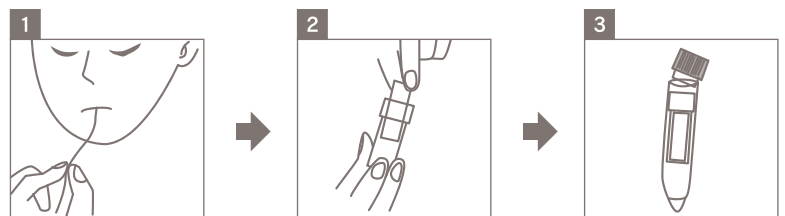


1
スポンジを口の中を含み、唾液を染み込ませます。(約40～90秒)

2
スポンジを口より取り出し、サスペンドインサートに入れます。(※1)

3
サスペンドインサートを回収用チューブに入れ、キャップをしっかり押し締めます。

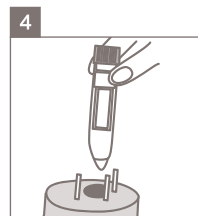

4
遠心機で遠心(1,500～3,000×g、約2分間)し、唾液を得ます。

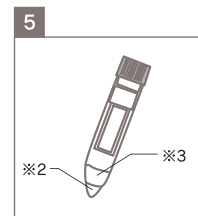

5
唾液中の残渣物は末底(※2)に溜まり、その上部(※3)が清澄唾液になります。

(※1) サリキッズの保持紐は中に入れるかハサミなどで切り離してください。



東京本社	〒102-0073 東京都千代田区九段北1-5-9 九段誠和ビル4F TEL.03-5215-5400(代) FAX.03-5215-6400
大阪支店	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-43 ファサード江坂ビル7F TEL.06-6339-6886(代) FAX.06-6339-8976
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル12F TEL.092-433-3600(代) FAX.092-433-3601
埼玉事業所 (配送センター)	〒369-0307 埼玉県児玉郡上里町嘉美1526-5 TEL.0495-35-3281(代) FAX.0495-35-3282

取扱店